



Q-interactive®

Kapitel 1

Förbered din iPad för Q-interactive

Q-interactive Användarguide

Januari 2023

Så konfigurerar du iPad-inställningarna för Q-interactive









För att kunna testa med Q-interactive behöver du två iPads; en till testledaren och en till testpersonen. På båda iPaden behöver du installera appen **Q-interactive Assess**, som är den iPad-applikation du använder för att administrera test.

Det är viktigt att inställningarna på båda iPaden är konfigurerade korrekt, innan du börjar administrera test med Q-interactive, så att de:

- paras ihop korrekt för att dela stimuli och hämta data från varandra,
- visar stimuli på ett enhetligt sätt, och
- eliminerar distraktioner som kan störa testsessionen.

Det här kapitlet beskriver hur du konfigurerar dina iPad, installerar appen Assess och ställer in andra app-specifika inställningar.

Om du är en van iPad-användare kan du snabbt konfigurera enheterna med hjälp av checklisten här nedanför. Följ annars instruktionerna i kommande avsnitt.

Testledarens iPad	Testpersonens iPad	Funktion	Inställning	Val
X	X	Visning och ljusstyrka	Utseende	Ljus
	X	Visning och ljusstyrka	Automatiskt	
	X	Visning och ljusstyrka	Ljusstyrka	Maximum
X	X	Visning och ljusstyrka	Autolås	15 min
X	X	Wi-Fi	På	Välj ett nätverk
X	X	Bluetooth		
X	X	Fokus	Stör ej	
X	X	Allmänt	Språk och region	Svenska - Sverige
X	X	Allmänt	Gester	
X	X	Assess	Lokalt nätverk	
X	X	Assess	Bluetooth	
X	X	Assess	Mikrofon	
X	X	Assess	Aktivera ljudinspelning	
X		Assess	Applikationsläge	Testledare
	X	Assess	Applikationsläge	Testperson

Lär känna din iPad – och öva!

Om du inte redan är en van användare, bör du avsätta tid till att bekanta dig med din iPad. Gå till https://support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad och ta del av den användarhandbok som gäller för ditt operativsystem.

Innan du använder din iPad för att administrera test på Q-interactive, är det viktigt att öva. Se vidare i kapitel 4 *Bekanta dig med Q-interactive Assess*.


Observera att de beskrivningar som ges i detta kapitel (inklusive skärmbilder) avser iOS 15 och iPad Air 2.

Justera ljusstyrkan

Du behöver justera ljusstyrkan i såväl testledarens som testpersonens iPad för att försäkra dig om att text och stimuli visas korrekt.


Gå till **Inställningar** → **Visning och ljusstyrka** och gör följande inställningar:

- 1) Välj **Ljust** under utseende.
- 2) Slå av **Automatisk ljusstyrka**.
- 3) Maximera ljusstyrkan genom att dra fingret över skärmen mot höger solsymbol tills hela raden är blå.
- 4) Tryck på **Autolås** och välj **15 minuter**.

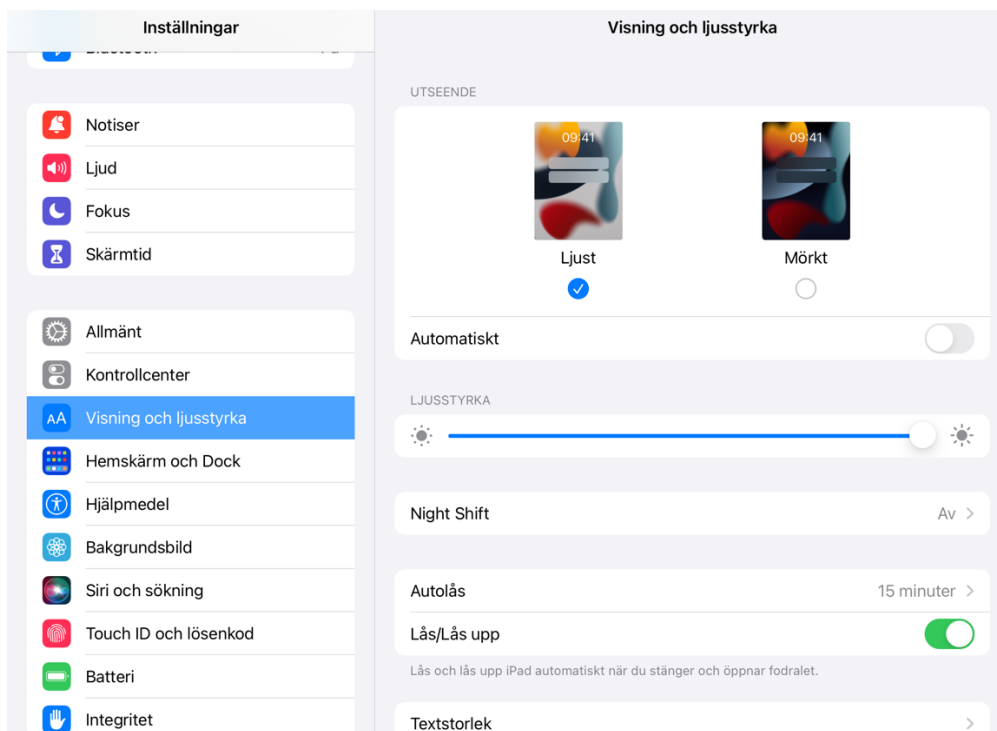

Anslut till Wi-Fi


- 1) Gå till **Inställningar**→**Wi-Fi**.
- 2) Slå på **Wi-Fi** för att visa nätverksalternativ. Välj ett av nätverken i listan och ange lösenordet om så krävs. När du är ansluten till nätverket kommer du att se ett  bredvid nätverksnamnet.

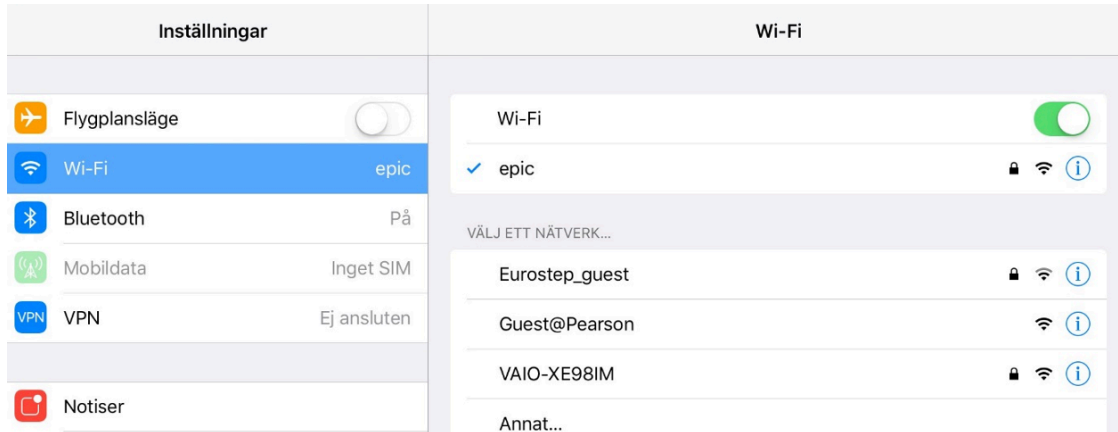

Slå på Bluetooth


Bluetooth möjliggör att iPaden kan kommunicera med varandra. Testledarens enhet skickar stimulusbilder/item till testpersonens enhet, och testpersonens enhet skickar svar i retur till testledarens enhet.

- 1) Gå till **Inställningar**→**Bluetooth**.
- 2) Slå på **Bluetooth**.

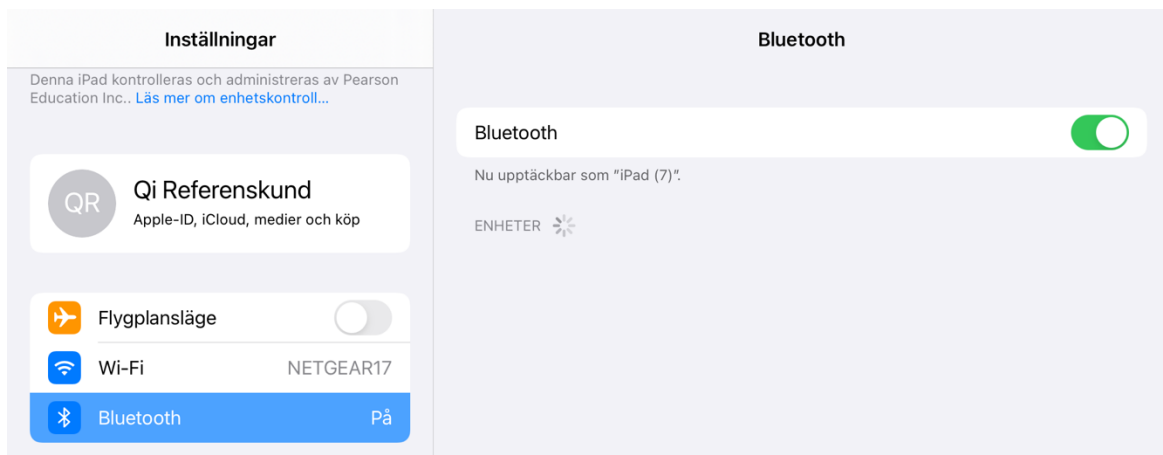

Slå av Gester

Gå till **Inställningar** → **Allmänt** → **Gester**. Slå av **Svep med fyra eller fem fingrar** och **Tillåt att fingret sveper från hörnet** på båda iPaden, för att undvika att testningen avbryts oavsiktligt.

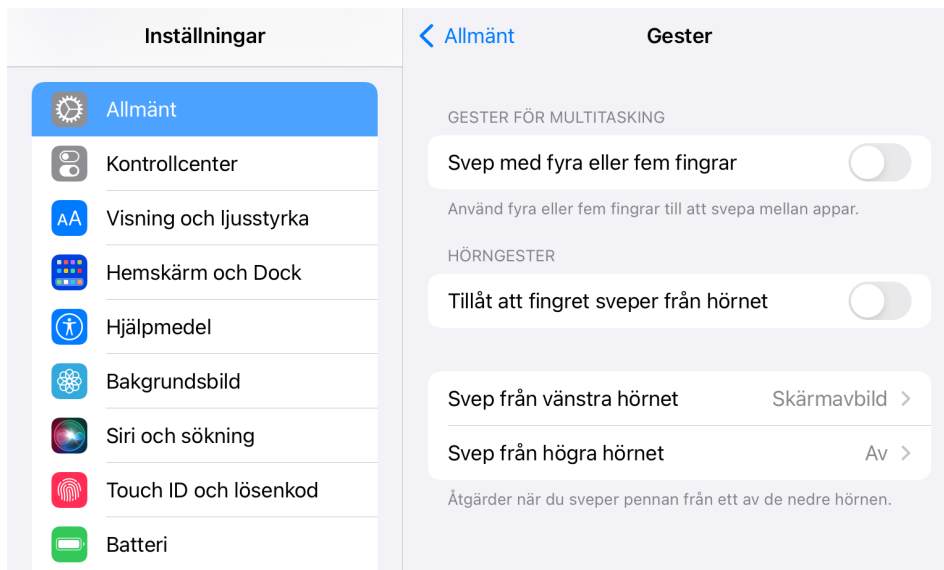

Ställ in Språk och region


Q-interactive använder de angivna språk- och regioninställningarna i din iPad för att visa texter, datum och andra formaterade värden i rätt format för ditt land.

Gå till **Inställningar** → **Allmänt** → **Språk och region**. Ställ in språk och region till svenska förhållanden.



Ställ in Stör ej

Gå till **Inställningar**→**Fokus**→**Stör ej**. Slå på funktionen **Stör ej**, för att undvika distraktioner som kan störa under testningen.

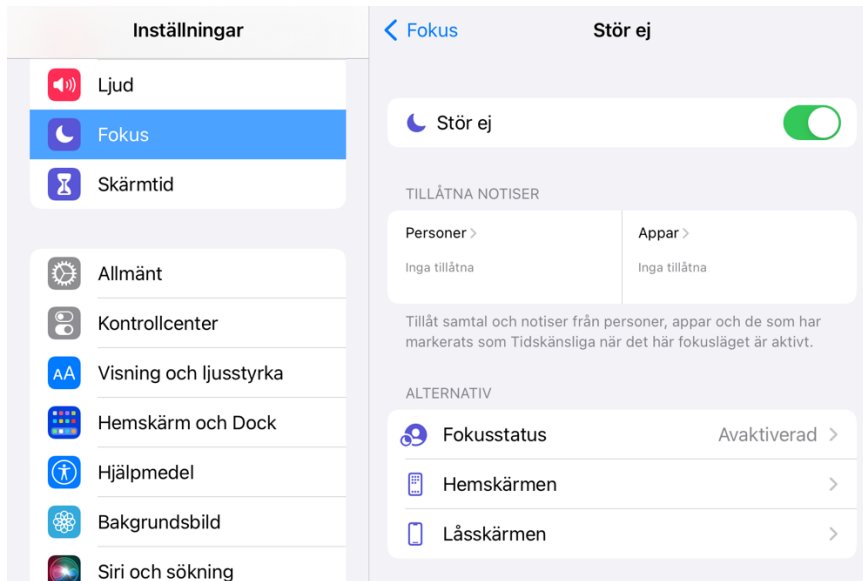

Installera Q-interactive Assess

Q-interactive Assess är en app som du kan ladda ned från Apple App Store och iTunes Store. Du måste installera appen på båda iPad-enheterna. Appen kan laddas ned antingen via datorn eller via iPad. Exemplet nedan visar hur du laddar ned Q-interactive Assess via iPad från App Store. För att ladda ned appen via datorn måste iTunes vara installerat. Gå till apple.com/itunes för att installera iTunes och följ anvisningarna för nedladdning.


- 1) Gå till hemskärmen på din iPad och tryck på symbolen för App Store.



- 2) Gå till sökfältet och skriv in **Q-interactive Assess**.




3) Tryck på **Hämta** och skriv in ditt Apple-ID för att ladda ned appen.

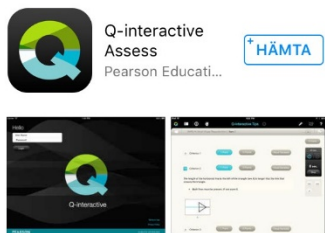


OBS för iCloud-användare: Q-interactive lagrar uppgifter i en fil som avsiktligt är utesluten från iCloud backup på grund av datasäkerhetsskäl.

Inställningar i Assess

Gå till **Inställningar** → **Assess** och gör följande inställningar:

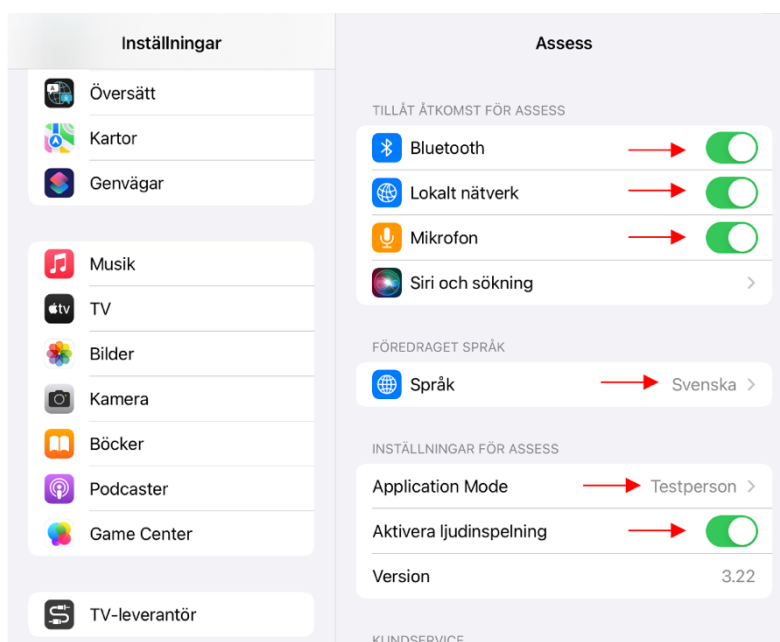

- 1) Slå på **Bluetooth**
- 2) Slå på **Lokalt nätverk**
- 3) Slå på **Mikrofon**
- 4) Ställ in språket till **Svenska**.
- 5) Tryck på **Application mode**. Ställ in en iPad på testledarens applikationsläge genom att välja **Testledare**. Ställ in den andra iPad på **Testperson**.

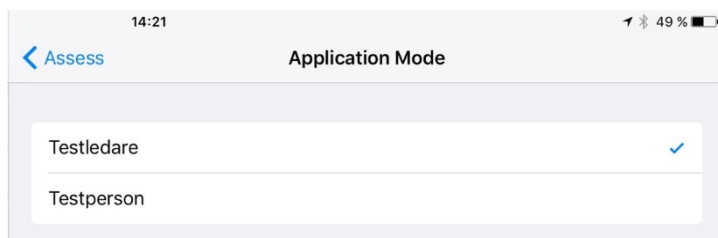


Observera: iPad Mini kan endast användas av testledaren.

6) Slå på funktionen **Aktivera ljudinspelning**.

I deltest där testpersonen ger muntliga svar spelar Assess automatiskt in testpersonens svaren på iPaden, när ljudinspelningsfunktionen är aktiverad. Efter administreringen är det möjligt att lyssna på ljudfilerna som stöd för rättning och poängsättning. I de fall där testpersonen inte ger samtycke till ljudinspelning, kan ljudinspelningsfunktionen inaktiveras.

Du märker att ljudinspelningsfunktionen är på när du administrerar ett test i Assess och ser en röd prick som lyser bredvid deltestets namn.

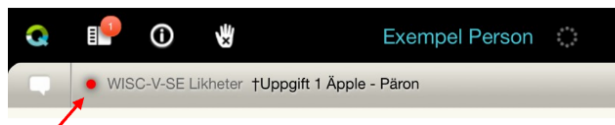

Tips!

- Försäkra dig om att iPad-enheterna är fulladdade innan en administrering genomförs och håll ett öga på batterinivån under testsessionen. Ha dina iPad-laddare tillgängliga för att kunna ladda vid behov.
- Kör inte andra appar under testsessionerna. Stäng av appar i bakgrunden.
- Efter varje avslutad testning, synkronisera data till Central och logga ut från Assess.
- Starta om iPaden efter varje testsession för optimal prestanda.
- När du är helt färdig med en testning och har kontrollerat att all data har överförts till Central, radera testningen från Assess för att frigöra utrymme.
- Förvara alltid iPad-enheterna på ett säkert ställe.
- Installera appen **Hitta** på enheterna. Då kan du radera Assess (och all data som finns på appen) fjärrstyrt från iTunes, om du exempelvis skulle bli av med Paden.