

Kom igång med Q-interactive

Startguide för Q-interactive




Här hittar du instruktioner som hjälper dig att installera Q-interactive Assess-appen, konfigurera inställningar på dina iPads, slutföra inloggningen och skapa övningstest. Vi rekommenderar att du övar på testadministrationen innan du går vidare till att testa med riktiga testdeltagare. Se också gärna vårt supportmaterial som finns tillgängligt via fliken Support på Q-interactive Central.

DEL 1: Ladda ner appen Assess


För att kunna använda systemet behöver du ladda ner Q-interactive Assess-appen till båda dina iPads.

STEG 1

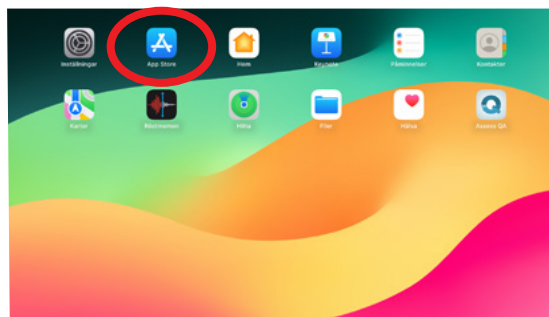

Öppna App Store som du hittar på startskärmen på din iPad.

STEG 2

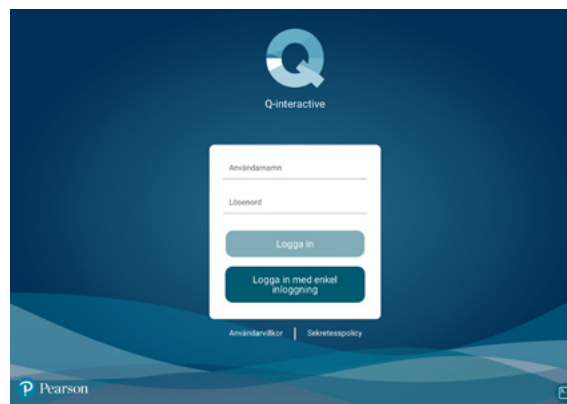


Sök efter Q-interactive och klicka på "Hämta".

DEL 2: Konfigurera iPads

När Assess-appen har laddats ner bör du konfigurera inställningarna på båda iPad-enheterna. Det här steget är viktigt för att:

- Ansluta iPads så att de kan kommunicera med varandra på rätt sätt
- Presentera stimuli på ett standardiserat sätt
- Få en smidig och problemfri funktionalitet i Q-interactive under testadministrationen
- Undvika avbrott som kan uppstå under testningen

STEG 1

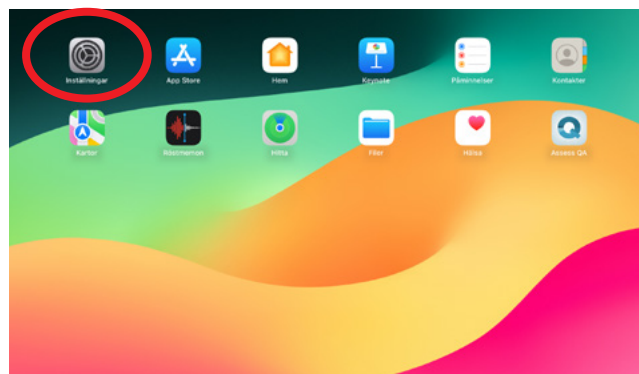

Tryck på *Inställningar* på startskärmen.

STEG 2


Konfigurera dina iPads i enlighet med informationen i tabellen nedan. Q-interactive Assess använder Wi-Fi för att ansluta testledarens iPad till testpersonens iPad. Du måste vara ansluten till ett aktivt Wi-Fi-nätverk när du synkroniserar iPaden, bland annat för att visa test som skickats till Assess före administrering och för att hämta testresultat. Du behöver inte vara ansluten till ett aktivt Wi-Fi-nätverk under testadministrationen, men Wi-Fi måste vara aktiverat på båda iPads.

Testledarens iPad	Testpersonens iPad	Inställning	Meny	Val
•	•	Wi-Fi	Slå på	Välj nätverk
•	•	Allmänt	Tangentbord	Slå av "Automatiska versaler"
•	•	Allmänt	Tangentbord	Slå av "Automatisk korrigering"
	•	Visning och ljusstyrka	Ljusstyrka	Full ljusstyrka/Skjut reglaget helt åt höger
	•	Visning och ljusstyrka	Night Shift	Slå av
	•	Visning och ljusstyrka	True Tone	Slå av
•	•	Visning och ljusstyrka	Autolås	15 minuter
	•	Hjälpmedel	Skärm och textstorlek	Slå av "Automatisk ljusstyrka"

DEL 3: Skapa ett test

Välkomstmailet är viktigt då det hjälper dig att ställa in dina inloggningsuppgifter.


STEG 1

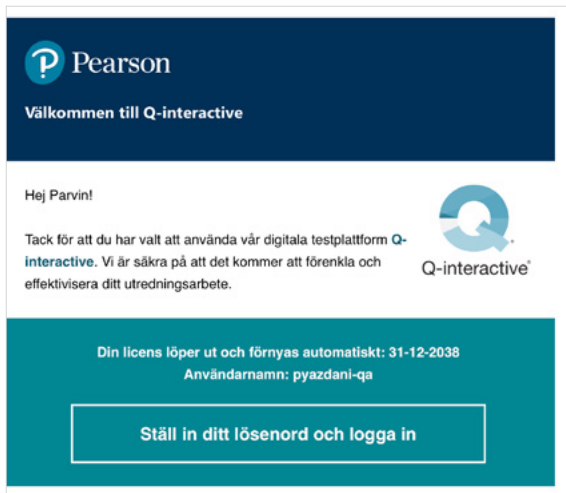

Använd länken i välkomstmailet för att skapa ditt lösenord för Q-interactive.


När du har skapat ditt lösenord och accepterat Q-interactives licensvillkor är du redo att skapa ett övningstest.

STEG 2

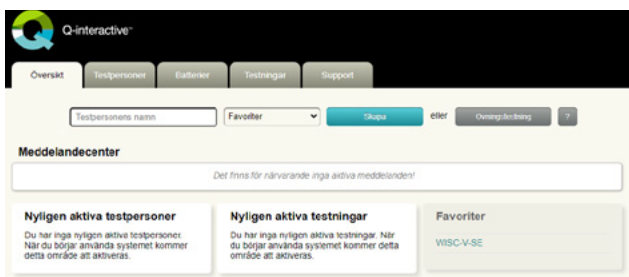

På fliken Kontrollpanelen klickar du på knappen Övningstestning. Skapa en profil för en övningstestperson och spara den nya övningsprofilen.

STEG 3

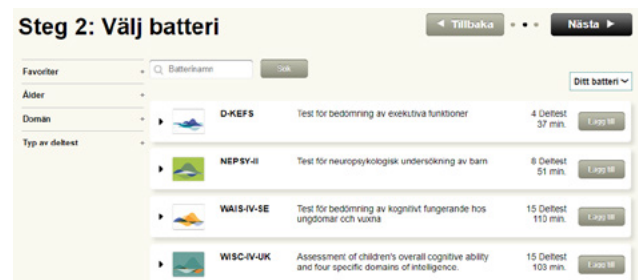


Välj det testbatteri du vill öva på genom att klicka på knappen Lägg till till höger om det valda batteriet och sedan på knappen Nästa i det övre högra hörnet.

STEG 4



Ange den planerade testtiden och klicka på knappen Avsluta i det övre högra hörnet.


STEG 5

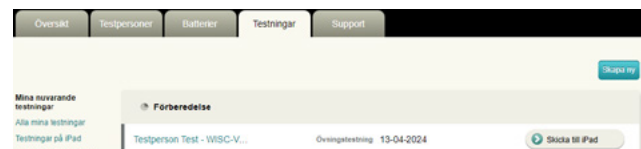

Klicka på knappen Skicka till iPad till höger om övningstestet. Du är nu redo att logga in på dina iPads!


STEG 6

För att börja testa loggar du in på båda iPads med samma inloggningsuppgifter som du valde tidigare.

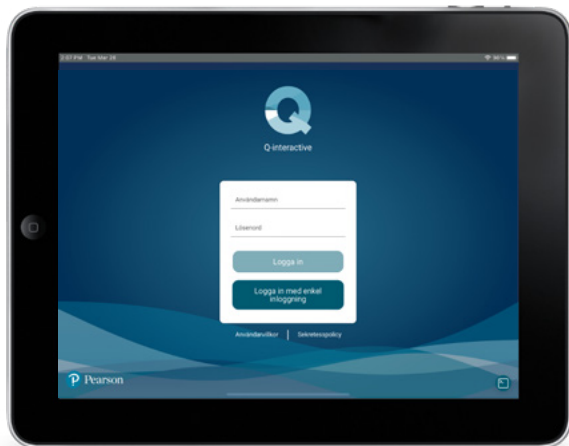**STEG 7**

Ange ditt användarnamn och lösenord. Det tar 10–20 minuter innan innehållet har laddats ner till båda iPads.

Om dina iPads är korrekt konfigurerade (se DEL 2 ovan) kommer de att ansluta till varandra när du börjar testa.

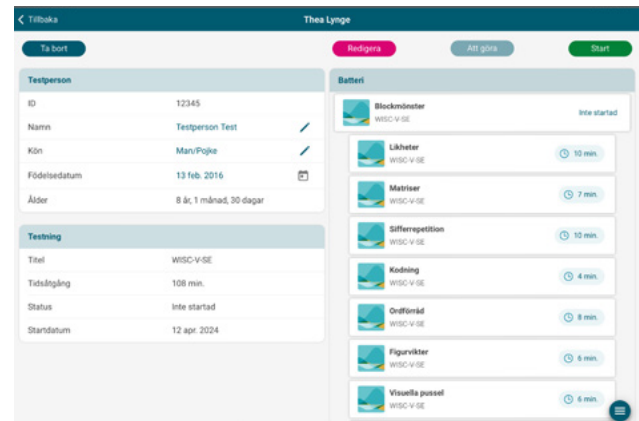STEG 8

Tryck på Start för att börja administrera testet. Övningstest har samma funktionalitet som riktiga test förutom att alla poäng visas som 0.

Nu är du redo att använda Q-interactive! Lycka till med testerna!